

Acti-Lance

Sicherheit und Komfort



SICHERHEITSLANZETTEN ZUR KAPILLAREN BLUTABNAHME



Einfaches Handling: intuitive 2 - Schritt Operation

Steril: die Gamma-sterilisierte Nadel bleibt bis zum Beginn des Tests im Kunststoff verschlossen, was absolute Sauberkeit und Sterilität garantiert

Effektiv: ein einziger Stich garantiert das Erhalten der richtigen Blutmenge



Sicher: Wiederverwendung ist ausgeschlossen

Sanft: die elekropolierte und silikonisierte Nadel wird linear geführt was ein minimales Schmerzempfinden und ein schnelles Heilen sichert

Zuverlässig: Risiko von Missbrauch oder falschen Blutproben wird durch einen einmaligen, patentierten Aktivierungsmechanismus eliminiert (macht eine Wiederverwendung unmöglich).



HAUPTEIGENSCHAFTEN VON ACTI-LANCE

- **Einfaches Handling:** intuitives Aktivieren, geringe Aktivierungskraft, kein Aufladen der Lanzette erforderlich, nur 2-Schritt Operation
- **Minimiertes Schmerzempfinden:** ultra scharfe, silikonisierte Nadel, Doppelfedermechanismus zur Beseitigung von Vibrationen
- **Ein Schnitt genügt:** verschiedene farbkodierte Versionen, ausreichend lange Nadel, adäquater Blutfluss
- **Selbsterstörender Mechanismus:** macht Wiederverwendung nach Benutzung unmöglich, sterile und zuverlässige Sicherheitskappe


Acti-Lance

Sicherheit und Komfort



HINWEISE ZUR ANWENDUNG

CE 0344

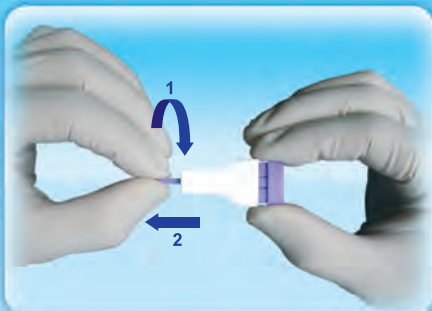

Die Schutzkappe abdrehen und herausziehen.



Die Acti-Lance Lanzette fest gegen die entsprechende Einstichstelle ansetzen und den Auslöseknopf betätigen um sie zu aktivieren.



Um die gewünschte Blutmenge zu erhalten, mit kurzen Unterbrechungen sanft neben die Einstichstelle drücken.

TECHNISCHE ANGABEN & BESTELLUNGSMITTEILUNGEN

Acti-Lance Sicherheitslanzetten sind in drei farbkodierten Versionen erhältlich. Verschiedene Nadelgrößen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Hauttypen und zahlreiche Bluttests.



Acti-Lance Lite
Katalog Nr. 7141
Schachtel 200Stück

28G 1.5 mm Einstichtiefe **28G** Nadel

Blutabnahme war noch nie so einfach! Acti-Lance Lite Sicherheitslanzette eignet sich vor allem zur Blutzuckerkontrolle, wird aber auch für Patienten mit delikater Haut, eingeschlossen Kinder empfohlen.



Acti-Lance Universal
Katalog Nr. 7142
Schachtel 200Stück

23G 1.8 mm Einstichtiefe **23G** Nadel

Acti-Lance Universal ist für die meisten universellen Tests, die mit Hilfe von kapillaren Blutproben durchgeführt werden geeignet. Mit Acti-Lance Universal können unter anderem Blutzucker - und Cholesterintests, Hämoglobintest und Blutgruppenbestimmungen gemacht werden.



Acti-Lance Special
Katalog Nr. 7143
Schachtel 200Stück

17G 2.0 mm Einstichtiefe **17G** Klinge

Acti-Lance Special ermöglicht Tests, bei denen größere Blutmengen erforderlich sind. Acti-Lance Special eignet sich jedoch für den breitesten Umfang von klinischen Blutproben. Sie eignet sich hauptsächlich für Fersenstiche bei Neugeborenen aber auch für Fingerstiche, die weniger Blut erfordern.

Mehr Informationen auf www.acti-lance.com